





サイズ : 85 \* 85mm

赤外線自動センサー検温機	部品説明	製品仕様	使用方法	注意事項
 <p>ZM-C09体温計説明書</p>	   <p>120mm</p> <p>150mm</p> <p>28mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、摂氏/華氏モニタ</li> <li>2、正常体温時 緑表示</li> <li>3、高温時 赤表示</li> <li>4、機能設置ボタン</li> <li>5、摂氏/華氏変換</li> <li>6、検温履歴 (戻る)</li> <li>7、検温履歴 (進む)</li> <li>8、赤外線センサー</li> <li>9、スピーカー</li> <li>10、壁掛け穴</li> <li>11、1/4インチインターフェース</li> <li>12、USB TYPE C 電源差込口</li> </ol>	<p>製品名 : 自動検温機          製品型番 : ZM-C09          適用環境温度 : 10° - 40°          製品色 : 白          反応時間 : 0.5s          検温精度 : ±0.3          入力電圧 : DC 5V          検温範囲 : 10° - 42.9°          製品サイズ : 120*150*28mm          応用場所 :</p> <p>事務所、ホテル、改札口、ビル入口、学校、店、高速バスステーション、バス、マンション入口、その他公共機関の入口など</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、電源接続後、モニタに0.0° を表示される。手や他の部位をセンサー前0.5-1秒くらいかざして、自動的に体温表示及び音声提示する。正常時音声メッセージで「正常」をアナウンスし、緑のランプを点字。体温は設定範囲の場合、音声メッセージで「体温高い」と警報音を流れる。</li> <li>2. アラーム温度設定             <ul style="list-style-type: none"> <li>・"S"ボタンを長押しをする。(5秒程)</li> <li>・画面に"F1"と表示後、温度が表示される。</li> <li>・"+", "-"ボタンでアラーム温度を設定可能。</li> <li>・最後に"S"ボタンを押し、設定完了。</li> </ul> <p>(初期アラーム温度 : 37.5°C)</p> </li> <li>3. 摂氏/華氏の変換             <ul style="list-style-type: none"> <li>"M"ボタンを押すと摂氏と華氏の表示変換できる。</li> <li>モニタに°Cと°Fの表示で判断できる。</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、測定温度の正確性を保つため、電源繋がって20分後から検温してください。</li> <li>2、高温、危険な環境で使用しないでください。また、製品を打つ、襲撃、分解されると検温の正確性を影響与えられるので、正常の環境でご使用ください。</li> <li>3、赤外線センサーが日光に反応することがあります。赤外線センサーに日光が当たらない場所でご使用下さい。</li> </ol>