

【検温機 三脚 組み立て方】

①三脚のネジ3点をそれぞれ緩め、脚を伸ばし、お使いいただきやすい高さに固定する

②三脚先端のネジに、付属の接続部品を回し取り付ける



③接続部品を取り付けたら、接続部品のネジと検温機の真裏のねじ穴をはめこみ、検温機を回して取り付ける
(接続部品の調節ネジで角度など調整可)



④トレイを三脚の脚に固定する



⑤アルコール噴霧器に単三電池4本入れ、トレイに載せる。
※予め①の段階で三脚にゴムなど通して置き（矢印）、噴霧器を固定すると落下を防げます。

