


# スマホで見る耳かき

## EAR SCOPE

### smart ear pick

#### 1. 製品各部の名称と機能

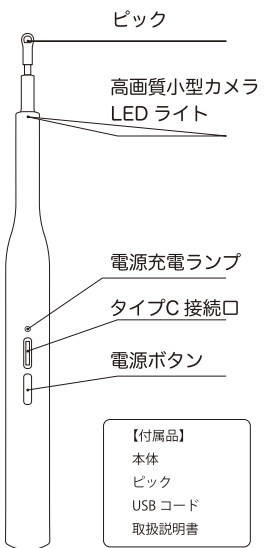

電源オン：電源ボタン長押し  
ランプ点灯

電源オフ：電源ボタン長押し  
ランプ消灯

充電時は緑ランプが点灯し、満充電の  
場合は消灯します

#### 2. ご使用前に

使用する前にご自身のスマートフォン  
にアプリをダウンロードしてください。



こちらのQR コードを  
スキャンしてください。

#### 3. 使い方

- ①製品本体の電源を入れます。
- ②スマートフォンのWi-Fi 設定画面を開き「earpick-xxx」(xxx はランダムな数字)を選びます。



- ③アプリを起動します。
- ④ピックと本体のねじをしっかりと固定してからご使用ください。



#### 4. アプリの操作について



使用中、左と右を切り替えることが  
可能です。また、お好みで画像表示の  
横向きと縦向きを切り替えることも  
可能です。写真やビデオ撮影ができ、  
アルバムで画像が確認できます。

#### 5. よくある質問

- 【1製品が接続できない】  
①製品Wi-Fiが表示されない  
本体の電源がオンになっていることを  
確認してください。  
②製品Wi-Fiに接続できない  
スマートフォン、及びアプリがWi-Fiを  
許可しているかどうか確認してくださ  
い。スマートフォンに接続している他の  
Wi-Fiや4G/5Gを一度停止してからお  
試しください。  
③製品Wi-Fiを接続したあと、アプリ画  
面が未接続の表示になったままの状態  
アプリが正しくダウンロードされてい  
るかどうかを確認してください。  
アプリ画面にWi-Fiの名称を表示して  
いるかどうかを確認し、なければ少し時  
間をおいてから再度開いてください。
- 【2. アプリが正しく表示されない】  
製品使用中、暗くなる、あるいはカメラ  
ボケやモニターボケの現象などがある  
場合、一度アプリをアンインストールし  
てから再度ダウンロードし、接続して  
ください。

ソフトウェアとアプリがアップデー  
トされているか確認してください。  
【3.使用時製品の本体が熱い】  
製品のカメラにLED ライトを搭載し  
ています。本製品はデュアル温度制御  
システムを採用し、使用中カメラ部分  
25°C、本体部分 32°Cが正常です。

#### 6. 商品スペック

型番	TOMO-E01
色	ネイビー
重量	40g(パッケージ含む)
サイズ (本体)	14x14x141.5mm
アンテナ	内蔵アンテナ
Wi-Fi 規格	IEEE802.11b/g/n
動作周波数	2.4Ghz
画像転送	20fps
画像センサー	CMOS
使用温度	-10~50°C
電池容量	150mAh
使用時間	約 50 分
充電時間	約 60 分
電圧電流	5V/1A
充電接続口	TYPE-C
カメラ直径	約 3.5mm
焦点距離	15mm
カメラ	HD カメラ
画素数	800 万画素
ジャイロスコop	3 軸

#### 製品保証書

製品に初期不良があった場合、当社が無償  
にて新品交換させていただきます。

【製品保証規定】

- 保証期間は購入日から1年間です。
- 通常の使用による故障や破損は保証対象  
外となります。
- 保証には、正規販売店で購入したことを  
証明する購入証明書もしくは、販売店・購  
入日が押印された保証書が必要です。
- ※購入証明とは購入元・日付・製品名・金  
額が記載された領収書や納品書、ネット購  
入の場合は購入履歴など。
- 分解や改造などを加えられた場合は保証  
対象外となります。

製品保証書	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日
お客様	ご住所
	お名前 電話番号

【対応窓口】

TOMONARI 株式会社  
〒683-0041 鳥取県米子市茶町 44 森本ビル3F  
連絡先 0859-30-4988 (平日 10時~17時)

【お問合せフォーム】

